

S -Primid (2499)**Osatutkimukset:**

S -Fenob (1387)

Indikaatiot Primidonihoidon seuranta**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Nestekromatografinen (HPLC)**Toimitusaika** 1-3 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 22-45 µmol/l

Toksinen pitoisuus: yli 115 µmol/l

Tulkinta Toksisia oireita voi esiintyä yli 70 µmol/l pitoisuuksilla. Primidoni metabolisoituu osittain fenobarbitaaliksi, jonka pitoisuus myös ilmoitetaan tuloksessa. Primidoni voi pienentää huomattavasti monien lääkeaineiden pitoisuuksia seerumissa.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi