

S -Trimip (3266)

Indikaatiot Trimpramiinihoidon seuranta.

Näyte 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan muu lääkitys.

Menetelmä HPLC/MS/MS

Toimitusaika 3-4 työpäivää

Viitearvot Terapeuttinen alue: 500 - 1000 nmol/l
Toksinen yli 2000 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
 $\text{nmol/l} = \mu\text{g/l} \times 3.40$

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi